



CANETUR

das 1x1 für den Hundenauf

I. Laborformular

Bitte füllen Sie das Laborformular vollständig aus. Hierzu auf der Vorderseite die Daten zu Ihrem Hund, zum Halter und das Datum der Probenentnahme eintragen. Kreuzen Sie bitte auf der Rückseite die gewünschte Untersuchung an.

II. Probenentnahme

Für einige Untersuchungen wird eine Sammelprobe von drei verschiedenen Kotabsätzen benötigt. Diese sammeln Sie bitte in einem Probengefäß.

Vorgehen bei der Probenentnahme:

1. Füllen Sie möglichst eine kompakte Menge Kot mit einem Löffel in das Probengefäß. Bitte nicht in dem Kot herumstochern, da viele Darmbakterien keinen Sauerstoff mögen und dann nicht mehr nachweisbar sind.
2. Achten Sie bitte bei der Probenentnahme darauf, dass so wenig Umweltkontamination wie möglich stattfindet (Laub, Erde, Gräser etc.).
3. Das Probengefäß sollte nach drei Proben zu 3/4 gefüllt und fest verschlossen sein.
4. Das gefüllte Sammelgefäß bitte bei Zimmertemperatur lagern.



Bitte in den Tagen vor der Probenentnahme die Fütterungsgewohnheiten beibehalten und keine Huminsäure (Sobamin), Moor, Aktivkohle oder Heilerde füttern.

Bei Wurmausscheidung: Sollten Sie in dem Kotabsatz Ihres Hundes einen Wurm oder Wurmglieder bemerken, senden Sie diese bitte in einem separaten Probengefäß in Alkohol oder physiologischer Kochsalzlösung umgehend zur Bestimmung an das Labor.

III. Versand

Den ausgefüllten Laborantrag und das fest verschlossene Probengefäß bitte in den Versandumschlag geben und als Maxibrief frankieren.

Bitte geben Sie die Sammelprobe umgehend nach der letzten Entnahme in die Post. Vermeiden Sie bitte einen Versand über das Wochenende oder über Feiertage, da eine zu lange Liegezeit der Probe das Ergebnis beeinflussen kann.

IV. Untersuchungsergebnisse

Die Ergebnisse der Untersuchung erhalten Sie nach ca. sieben bis zehn Werktagen per E-Mail, die wir dann telefonisch besprechen. Mit Befundbericht erhalten Sie auch die zugehörige Zahlungsinformation.